

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

SET MISURAZIONE PESSARIO IN SILICONE ASSEMBLATO COD. FOR.SEPTESIL


REF PESSARI

FOR.70.51750 diametro 50	FOR.70.51755 diametro 55	FOR.70.51760 diametro 60	FOR.70.51765 diametro 65
FOR.70.51770 diametro 70	FOR.70.51775 diametro 75	FOR.70.51780 diametro 80	FOR.70.51785 diametro 85
FOR.70.51790 diametro 90	FOR.70.51795 diametro 95	/	

DESCRIZIONE GENERALE

Box contenente 10 pessari in gomma delle seguenti misure: 50/55/60/65/70/75/80/85/90/95.

Il dispositivo consente al personale specializzato (medico ginecologo) di facilitare l'individuazione della

misura corretta per il paziente ()

Dispositivo interno (pessario) è utilizzato per la contenzione del prolasso uterino.

Viene impiegato in sostituzione dell'intervento chirurgico da eseguire sul Paziente.

Si tratta di un Dispositivo invasivo che penetra nel corso tramite un orifizio naturale, diverso dal Dispositivo invasivo di tipo chirurgico, non è destinato ad essere allacciato ad un Dispositivo Medico attivo, ed è destinato ad un uso a lungo termine (superiore ai 30 giorni ma non oltre i 90 giorni).

CLASSE DISPOSITIVO: IIb

INFORMAZIONI GENERALI

Grado di silicone: GP500

Colore: TRASPARENTE

Migliore supporto e flessibilità

NON STERILE

ISTRUZIONI PER L'USO

Il Pessario va inserito operando nel seguente modo:


1. superare l'imbocco osteo-vaginale;
2. piegare l'anello ad ellisse per facilitarne l'ingresso;
3. cerchiare il collo dell'utero.

Non inserire il dispositivo nel caso cada dalla confezione, o nel caso in cui la confezione non sia integra.

SMALTIMENTO

Smaltire a fine uso, rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti. Non sono presenti sostanze tossiche. Le parti costituenti il Dispositivo, come già detto, sono in silicone.

Caratteristiche Tecniche:

Produttore:	FOR.ME.SA srl ¹
Campo di applicazione:	Adulti  0476
Conformità:	Dispositivo Medico classe IIb, conforme all'Articolo 12 Direttiva CEE 93/42