

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

PESSARIO IN GOMMA

MISURE

FOR.70.51645 diametro 45	FOR.70.51650 diametro 50	FOR.70.51653 diametro 53	FOR.70.51655 diametro 55
FOR.70.51660 diametro 60	FOR.70.51663 diametro 63	FOR.70.51665 diametro 65	FOR.70.51670 diametro 70
FOR.70.51675 diametro 75	FOR.70.51680 diametro 80	FOR.70.51683 diametro 83	FOR.70.51685 diametro 85
FOR.70.51689 diametro 89	FOR.70.51690 diametro 90	FOR.70.51695 diametro 95	FOR.70.516100 diametro 100

DESCRIZIONE

Dispositivo utilizzato per la contenzione del prolasso uterino.

Viene impiegato in sostituzione dell'intervento chirurgico da eseguire sul Paziente.

Si tratta di un Dispositivo invasivo che penetra nel corpo tramite un orifizio naturale (diverso dal Dispositivo invasivo di tipo chirurgico); non è destinato ad essere allacciato ad un Dispositivo Medico attivo; è destinato ad un uso superiore ai 30 giorni ma, preferibilmente, non oltre i 90 giorni.

Spessore unico: 1,2 cm

CLASSE DISPOSITIVO: IIb

INFORMAZIONI GENERALI

Gomma naturale

Colore pigmento: ROSSO

Migliore supporto e flessibilità

NON STERILE

ISTRUZIONI PER L'USO

Il Pessario va inserito operando nel seguente modo:


1. superare l'imbocco osteo-vaginale;
2. piegare l'anello ad ellisse per facilitarne l'ingresso;
3. cerchiare il collo dell'utero.

Non inserire il dispositivo nel caso cada dalla confezione, o nel caso in cui la confezione non sia integra.

SMALTIMENTO

Smaltire a fine uso, rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti. Non sono presenti sostanze tossiche. Le parti costituenti il Dispositivo, come già detto, sono in gomma naturale.

Caratteristiche Tecniche:

Produttore:	FOR.ME.SA srl ¹
Campo di applicazione:	Adulti  0476
Conformità:	Dispositivo Medico classe IIb, conforme all'Articolo 12 Direttiva CEE 93/42