

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

PESSARIO IN SILICONE BLU STERILE

MISURE

FOR.70.51950 diametro 50	FOR.70.51955 diametro 55	FOR.70.51960 diametro 60	FOR.70.51965 diametro 65
FOR.70.51970 diametro 70	FOR.70.51975 diametro 75	FOR.70.51980 diametro 80	FOR.70.51985 diametro 85
FOR.70.51990 diametro 90	FOR.70.51995 diametro 95	FOR.70.519100 diametro 100	/

DESCRIZIONE

Dispositivo utilizzato per la contenzione del prolasso uterino.

Viene impiegato in sostituzione dell'intervento chirurgico da eseguire sul Paziente.

Si tratta di un Dispositivo invasivo che penetra nel corpo tramite un orifizio naturale (diverso dal Dispositivo invasivo di tipo chirurgico); non è destinato ad essere allacciato ad un Dispositivo Medico attivo; è destinato ad un uso superiore ai 30 giorni ma, preferibilmente, non oltre i 90 giorni.

STERILE: dispositivo sterilizzato con ossido di etilene.

CLASSE DISPOSITIVO: IIb

INFORMAZIONI GENERALI

Grado di silicone: GP500

Colore pigmento: AZZURRO

Migliore supporto e flessibilità.

Sterilizzato con Ossido di Etilene.

ISTRUZIONI PER L'USO

Il dispositivo medico è fornito sterile. Il personale medico incaricato deve attenersi alle fondamentali pratiche igieniche:

- lavarsi le mani con soluzione disinfettante;
- indossare guanti puliti;
- procedere con le operazioni di inserimento sotto riportate.

Il Pessario va inserito operando nel seguente modo:


1. superare l'imbocco osteo-vaginale;
2. piegare l'anello ad ellisse per facilitarne l'ingresso;
3. cerchiare il collo dell'utero.

Non inserire il dispositivo nel caso cada dalla confezione, o nel caso in cui la confezione non sia integra.

SMALTIMENTO

Smaltire a fine uso, rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti. Non sono presenti sostanze tossiche. Le parti costituenti il dispositivo, come già detto, sono in silicone.

Caratteristiche Tecniche:

Produttore:	FOR.ME.SA srl ¹
Campo di applicazione:	Adulti  0476
Conformità:	Dispositivo Medico classe IIb, conforme all'Articolo 12 Direttiva CEE 93/42